

Configuración de básculas neonatales

Instrucciones para los Modelos 450, 451, 459 y 4591

La instalación consiste de conectar en ensamblaje de la columna y el cabezal a la base de la plataforma y de conectar los acoples internos. Se proporcionan tornillos y arandelas además de 2 tornillos y arandelas extras para el montaje de la báscula. (Consulte la Figura 1)

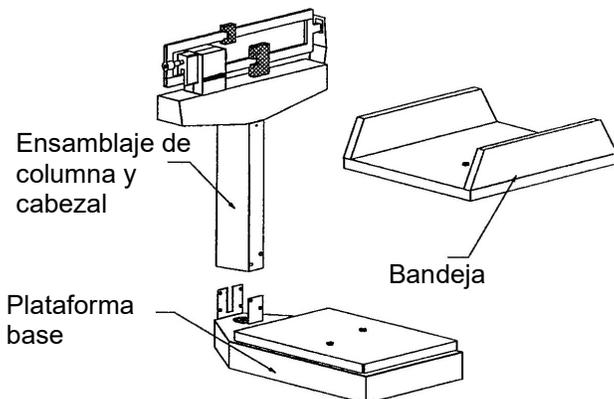


Figura 1: piezas componentes para el ensamblaje de la báscula.

1. Desempaque con cuidado los componentes de la báscula de la caja y verifique si hay alguna discrepancia con respecto a su condición. Conserve la caja para devolver la báscula si fuera necesario.
2. Deslice la columna sobre el soporte de columna en la plataforma base y asegúrese de que la varilla guía en la columna entre en el recorte en el conector de la base. Asegure la columna a la plataforma base con los seis (6) tornillos con cabeza reforzada 1/4 x 20 y las arandelas elásticas de seguridad. (Consulte la Figura 2)

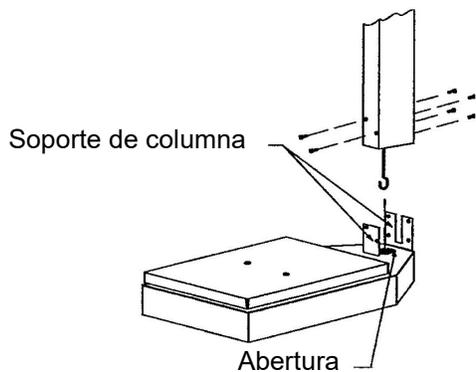


Figura 2: imagen que muestra la instalación de la columna en la base de la plataforma. La vista lateral muestra cómo utilizar los (6) tornillos con cabeza reforzada 1/4 x 20 y las arandelas elásticas de seguridad: dos en el frente, cuatro en la parte trasera de la base de la columna.



Cardinal Scale Manufacturing Co.
203 E Daugherty, Webb City, MO 64870 EE. UU.
Tel: 417-673-4631 o 1-800-641-2008 Fax: 417-673-2153

3. Coloque la báscula sobre un escritorio con la base de la plataforma apuntando hacia abajo y con la columna en posición horizontal con respecto al piso. Sostenga el gancho de la varilla guía hacia arriba y empuje la palanca hacia adentro hacia la columna y luego deslice el gancho de la varilla guía en el bucle de la palanca. (Consulte la Figura 3)

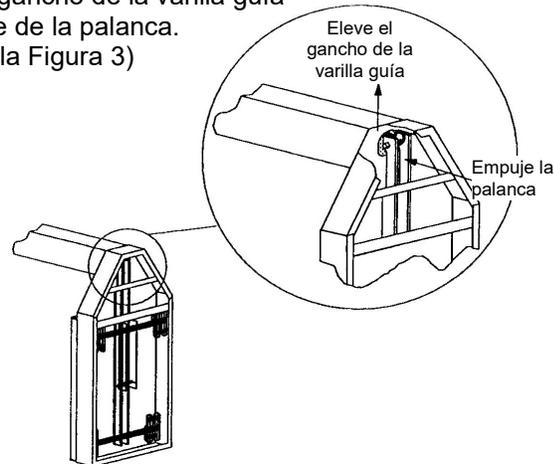


Figura 3: imagen que muestra el procedimiento para montar el gancho de la varilla guía en el bucle de la palanca en la base de la plataforma.

4. Instale la bandeja para el bebé en la plataforma de la báscula utilizando los dos (2) tornillos de cabeza plana proporcionados. No apriete demasiado los tornillos. (consulte la Figura 4)

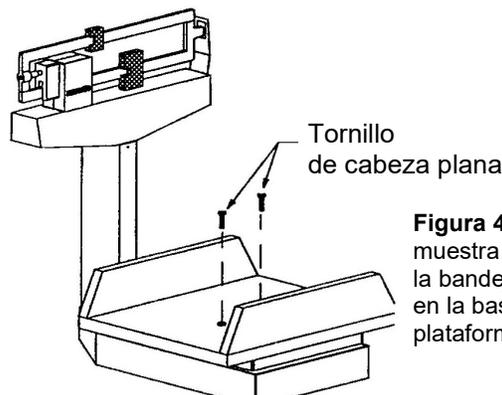


Figura 4: imagen que muestra la instalación de la bandeja para el bebé en la base de la plataforma.

5. Para equilibrar la báscula, colóquela sobre un sitio plano y estable. Mueva ambas pesas a cero y gire el tornillo de ajuste en el extremo izquierdo del brazo basculante hacia adentro o hacia afuera según sea necesario para que el brazo basculante se equilibre en el punto medio del rectángulo limitante.

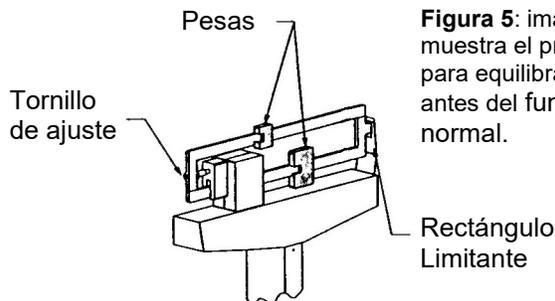


Figura 5: imagen que muestra el procedimiento para equilibrar la báscula antes del funcionamiento normal.