

## Báscula portátil para sillas de ruedas

### Instrucciones de funcionamiento



**¡Precaución! No deje caer la báscula desde la posición de transporte ya que se podría dañar la celda de carga.**

1. Desde la posición de transporte, coloque la báscula en el piso.

**NO** retire el pasador de almacenamiento ni haga funcionar la palanca de desbloqueo de la columna sin haber realizado antes este procedimiento.

**¡NO UTILICE LA BÁSCULA SOBRE PISOS ALFOMBRADOS!**

2. Retire el pasador de almacenamiento.
3. Deslice la palanca de desbloqueo de la columna para desbloquear la columna y luego levántela hasta llevarla a la posición totalmente recta y trabada.



**¡NO LA DEJE CAER!**



4. Presione la tecla **ON** cuando el indicador esté apagado para encenderlo.
5. Cuando aparece cero en el indicador, presione la tecla **TARE** (tara), ingrese el peso de la silla de ruedas y luego presione la tecla **ENTER** (ingresar). El indicador mostrará un peso negativo igual al peso de la silla de ruedas.
6. Ubique al paciente sobre la báscula empujando la silla de ruedas sobre la plataforma. **NUNCA EMPUJE** al paciente sobre o fuera de la báscula. Bloquee las ruedas de la silla de ruedas mientras pese al paciente.



**¡ADVERTENCIA! Nunca deje a un paciente desatendido mientras está sobre la báscula. El hecho de no mantener el control sobre el paciente y/o la silla de ruedas en todo momento puede resultar en una lesión grave para el paciente.**

7. Cuando la lectura de peso sea estable, lea el peso del paciente.
8. Retire al paciente de la báscula retrocediendo por la rampa.



**Dirección del recorrido**



**Posición correcta de almacenamiento**

9. Para guardar la báscula, utilice el desbloqueo de la columna para desbloquearla y plegarla hasta la posición donde se traba. Vuelva a colocar el pasador de almacenamiento (*consulte la etiqueta de precaución en la base de la báscula*). Almacene la báscula en posición recta, preferentemente cerca de una pared para una mayor protección contra daños.

**ISO**  
REGISTERED 9001

Impreso en EE. UU.  
0065-C336-08 Rev M 01/18

203 E Daugherty, Webb City, MO 64870 EE. UU.  
Tel. 417-673-4631 o 1-800-641-2008  
Fax: 417-673-2153

Asistencia técnica: 1-866-254-8261  
Correo electrónico: [tech@cardet.com](mailto:tech@cardet.com)