

Pèse-personne portable pour fauteuils roulants Mode d'emploi



Attention! Ne pas échapper le pèse-personne de sa position de transport, puisque cela pourrait endommager les capteurs de pesée.

1. À partir de la position de transport, poser le pèse-personne sur le sol.

NE PAS retirer la goupille d'entreposage ou actionner le levier de dégagement de la colonne avant cette opération.

NE PAS UTILISER LE PÈSE-PERSONNE SUR DES PLANCHERS TAPISSÉS!

2. Retirer la goupille d'entreposage.
3. Faire glisser le levier de dégagement de la colonne pour libérer la colonne, puis soulever jusqu'en position verticale et verrouillée.



NE PAS ÉCHAPPER!



4. Appuyer sur la touche **ON** pour allumer le voyant.
5. Lorsque le voyant indique « zéro », appuyer sur la touche **TARE**, saisir le poids du fauteuil roulant, puis appuyer sur la touche **ENTER**. Le voyant affichera un poids négatif égal au poids du fauteuil roulant.
6. Positionner le patient sur le pèse-personne en tirant le fauteuil roulant sur le pèse-personne. **NE JAMAIS POUSSER** le patient pour le positionner sur le pèse-personne ou le retirer. Verrouiller les roues du fauteuil roulant pendant la pesée du patient.



AVERTISSEMENT! Ne jamais laisser un patient sans surveillance sur la plateforme du pèse-personne. Le fait de ne pas garder le contrôle du patient ou du fauteuil roulant en tout temps peut causer de graves blessures au patient.

7. Lorsque l'affichage du poids est stable, lire le poids du patient.
8. Retirer le patient du pèse-personne en reculant sur la rampe.



Sens du déplacement



Position correcte pour l'entreposage

9. Pour l'entreposage, utiliser le levier de dégagement de la colonne pour libérer la colonne et rabattre en position verrouillée. Repositionner la goupille d'entreposage (*consulter l'étiquette d'avertissement sur la base de la pèse-personne*). Entreposer dans une position verticale, de préférence près d'un mur pour une protection maximale contre les dommages.

ISO
REGISTERED 9001

Imprimé aux États-Unis
0065-C336-08 Rev M 01/18

203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 ÉTATS-UNIS
Tél. : 417 673-4631 ou 1 800 641-2008
Télécopieur : 417 673-2153

Soutien technique : 1 866 254-8261
Courriel : tech@cardet.com