



HS25KGP

Báscula Pediátrica de Suspensión

Manual de operación



ISO
REGISTERED 9001
ISO

8535-M214-O1 Rev. A
10/10

CARDINAL SCALE MFG. CO.
PO Box 151 • Webb City, MO 64870
Ph: 417-673-4631 • Fax: 417-673-5001
www.detectoscale.com

Printed in USA

Technical Support: Ph: 866-254-8261 • techsupport@cardet.com

INTRODUCCION

La bascula pesa bebe mecánica de suspensión modelo HS25KGP tipo salter (25kg) de capacidad. Equipada con porta-bebé de vinil perfecto para la colocación segura y cómoda del bebé hacen de este equipo el ideal para la medición en la consulta médica en el consultorio o para el trabajo de visita a domicilio por los doctores o enfermeras. Su tamaño le permite ser transportado de forma sencilla y segura

Este manual contiene información de operación del bascula. Favor de leer antes de usar el equipo y conservarlo para futuras referencias.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES	
BASCULA	
CAPACIDAD	25 KG
DIVISION	100 GR
DIAMETRO DIAL	20 CM
TARA	POR TORNILLO DE ACERO
MATERIAL	LAMINA DE ACERO
ACABADO	ESMALTE BLANCO HORNEADO
GANCHOS	TIPO "S" DE ACERO CON ZINC CROMADO
PESO	1.25 KG
PORTA BEBE	
MATERIAL	VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE
DIMENSIONES BXHXL	381 X 266 X 406 MM

LISTADO DE PARTES

ITEM	CAN	PART NUM	DESCRIPCION
1	4	6600-1870	Tornillo de la cubierta
2	1	6600-1871	Cubierta plastic
3	2	6600-1872	Gancho tipo S
4	1	HSPANT	Portabebé

DESEMBALAJE

1. Abra la caja.
2. Remueva la cubierta de espuma de unicel de la caja.
3. Después, remueva los ganchos tipo S insertados en el unicel y déjelos a un lado.
4. Sujeta la báscula y retire las protecciones.
5. Retire el portabebé de la caja.
6. Retire la cubierta inferior de la caja.
7. Para colocar los ganchos, para el primer gancho, gire e inserte en la parte superior como se ilustra en la figura No 1.
8. Para el segundo gancho, realice la misma operación anterior, colocándolo en la posición inferior de la báscula.
9. Retire la cubierta de plástico del indicador.
10. Retire el seguro de cartón para liberar el sistema de suspensión.
11. La báscula está lista para usarse.

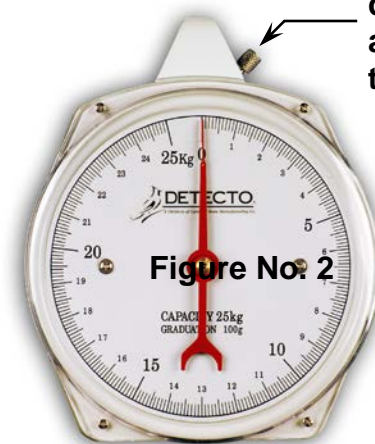


Figura No. 1

OPERACION

1. Refiriéndose a la figura No. 1, instalación de los ganchos tipo S.
2. Desenvuelva el portabebé.
3. Cuelgue el portabebé sobre el gancho inferior, y el gancho superior sobre un soporte firme y fuerte. Ref. Figura No. 1.
4. Refiriéndose a la figura No. 2, gire la perilla de ajuste para calibrar la aguja indicadora hasta el punto de indicación este sobre el "0".
5. Coloque al bebé en el portabebé.
6. La aguja indicadora mostrará el peso del bebé.
7. Remueva al bebé del portabebé, el indicador volverá a "0.0 kg", en caso de ser necesario ajuste nuevamente como se indica en el punto 4.

Perilla de ajuste, tara



PRECAUCION! NUNCA DEJE SOLO AL BEBÉ CUANDO EL PORTABEBÉ ESTE COLOCADO EN LA BÁSCULA, PODRÍA CAER!

CUIDADO Y LIMPIEZA

- **NO** rocíe agua directamente sobre la báscula.
- **LIMPIE** la báscula usando un paño o trapo húmedo y un limpiador suave.
NOTA! Algunos tipos de toallas pueden rayar la cubierta protectora.
- **NO** utilice acetona, alcohol, u otros disolventes volátiles para la limpieza.

