

# Montaje y funcionamiento del tallímetro portátil PHR de Detecto

① Abra el accesorio de inserción. Deslice el cabezal y levántelo para retirarlo. Ubique y retire los estabilizadores de la caja.




③ Retire de la caja las piezas de la columna.



⑤ Coloque la base PHR sobre el piso.



⑦ Inserte la pieza de la columna con la marca "A-B" en la pieza "A" y presione hacia abajo para trabarla en su lugar.

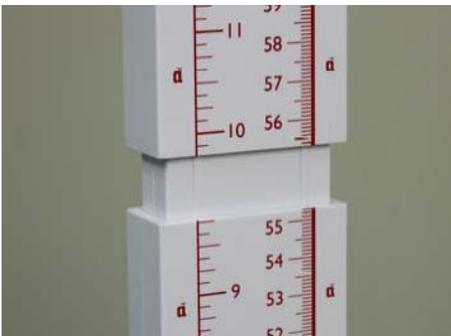

② Levante el accesorio de inserción hacia un lado para exponer completamente la base y con las dos manos retire la base de la caja.




④ Verifique los contenidos de la caja: base, cabeza, (4) piezas de la columna y (2) estabilizadores.



⑥ Instale (1) estabilizador sobre la pieza "A" de la columna (con la flecha grande) e insértela en la base como se muestra a continuación.



⑧ Inserte la pieza de la columna con la marca "B-C" en la pieza "A-B" y presione hacia abajo para trabarla en su lugar.

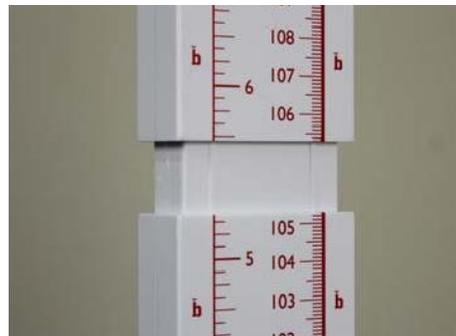

## Montaje, cont.

⑨ Instale (1) estabilizador sobre la pieza "C" e insértela en el cabezal como se muestra a continuación.



⑩ Inserte la pieza de la columna con la marca "B-C" en la pieza "B-C" y presione hacia abajo para trabarla en su lugar.



El montaje está completo. El tallímetro portátil PHR está listo para ser usado.

## Funcionamiento

1. Ubique los estabilizadores superior e inferior sobre la columna y coloque el PHR contra la pared.
2. Eleve el cabezal bien por encima de la estatura estimada del paciente.
3. Ayude al paciente a subir a la base PHR (o a la báscula). Tenga en cuenta que el paciente debe pararse derecho con la espalda tocando levemente la regla.
4. Baje el cabezal hacia la cabeza del paciente y lea la estatura. La estatura se lee en las flechas rojas sobre el cabezal.



Cabezal instalado para usar sin báscula.



Cabezal instalado para usar con báscula.