

ديدكتو



[www.detecto.com](http://www.detecto.com)

سلم توك

ميزان صحي منزلي صوتي

دليل التشغيل

شركة كاردينال سكال

203 شرق دوغترى

مدينة ويب مو 64870 الولايات المتحدة الأمريكية

## الملاح

السعة سلم توك سلم توك XL	400 lb x 0.1 lb / 180kg x 0.1kg 550 lb x 0.1 lb / 250kg x 0.1kg
مؤشر الوزن الشاشة الصوت	4 ارقام ، 7 قطع ال س يدي مع 1.5 داخلي / 38م ارقام مرتفعة انجليزي / اسباني / غلق
المؤشرات	مؤشر صوت ( lb ) مؤشر وزن (kg) ، مؤشر البطارية منخفضة
الوظائف	فتح تلقائي – ( أقل وزن مطلوب 11lb / 5 كجم ) غلق تلقائي – ( 10 ثواني )
طاقة	تتضمن على 3 بطاريات "AAA" ( 4.5 VDC )

### تفريغ



SlimTALK

قبل استخدام الميزان ، تأكد من أنك استملت الميزان بحالة جيدة ، وعند نزع الميزان من العلبة افحصه جيدا حتى لا تكون به إشارات تلف مثل الخدش أو خدش خارجي .  
احتفظ بالكرتون والعلبة حتى تستطيع شحنه وإرجاعه في حالة الضرورة . إنها مسؤولية المشتري في تعبئة المطالبات أو الشكاوى لأي أضرار أو خسائر حدثت أثناء النقل .

### تهيئة رفع الطاقة



SlimTALK XL

1. افتح الميزان من الأعلى وضح اللوحة المزلة أسفل الميزان

2. أزل اللوحة لكي توصل حامل البطارية

3. قم بتركيب ثلاث مخارج البطارية بأحجامهم

4. ضع الميزان على مستوى سطح متساوي مثل المكتب أو الطاولة أو المقعد .

5. اضغط فتح لتشغيل الميزان

لاحظ : الحد الأدنى للوزن 11lb / 5 كجم لتشغيل الميزان

6. سوف يعرض الميزان 0.0 لمدة 10 ثواني تقريبا

وبعدها يغلق

7. تم تثبيت الميزان بشكل كامل ومستعد للتشغيل الطبيعي

### التشغيل :

1. خطوة فتح الميزان وهو سيقوم بالتشغيل تلقائيا
2. سوف يقوم الميزان بقياس الوزن بمجرد تثبيته الشاشة سوف تومض لعدة مرات وبعدها يفتح الوزن . وإذا صدر صوت الفتح يقوم الميزان بإعلان الوزن (باللغة المحددة)
3. خطوة غلق الجهاز الوزن سوف يستمر في العرض لمدة 10 ثواني .
4. الميزان سوف ينغلق تلقائيا . وفي حالة فتح الصوت سيقول الجهاز " وداعا" ( باللغة المحددة له ) عند الغلق .


### مفتاح وحدة الوزن

مفتاح وحدة الوزن (ib/kg مفتاح ) هو مفتاح زر ضغط موجود أسفل الميزان . وفي حالة ان الميزان مغلق اضغط المفتاح لكي يمكنك التبديل بين ib و kg .



### مفتاح صوت اللغة

قم بتحريك المفتاح لتحديد اللغة أو غلق الصوت .

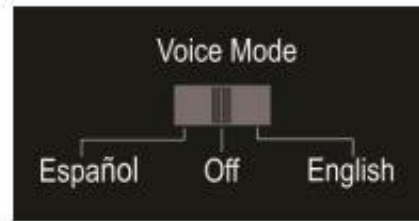

### انخفاض البطارية

عند وصول مستوى فولت لانخفاض حاد للوزن الدقيق وتكون رسالة ١٥ سوف يتم عرضها

وسيتم إغلاق الميزان تلقائياً. قم بإزالة البطاريات القديمة واستبدلها ببطاريات جديدة قبل استكمال التشغيل .

### رسائل الحالة والخطأ

**لاحظ :** رسائل الخطأ يتم عرضها لمدة ٢ ثانية وسيتم إغلاق الميزان تلقائياً بعدها .

المعنى	العرض
زيادة في السعة	Err
انخفاض البطارية	Lo

### تثبيت سجادة القدم

في حالة استخدامك للميزان على سجادة . فنحن ننصحك باستخدام سجادة القدم المستخدمة . ولكي تثبت هذه السجادة اتبع الآتي :-

1. قم بإزالة سجادة القدم (4) من العلبة .
2. قم بمحاذاة شوكات سجادة القدم في الفتحات المخصصة لمكان القدم الموجود بالميزان .
3. أدخل شوكات سجادة القدم في الفتحات المخصصة لها وتأكد من أنها بمحاذاة مستقيمة وأدخلها لأسفل فتحات القدم بالميزان .
4. كن حذرا ولا تقم بتدوير سجادة القدم ، مع ضغط خفيف بلطف بشكل مستقيم لأسفل السجادة لتثبيتها على قدم الميزان .
5. كرر خطوة رقم 2 من خلال 4 لفتحات سجادة القدم المتبقية 3 .



### طرف التخلص المناسبة

عند وصول الميزان لنهاية الاستخدام فإنه يجب التخلص منه . ولا يجب التخلص منه على أنه نفاية مهملة غير مخزنة . بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2002/96 فإن هذا الجهاز إرجاعه للموزع الذي شراؤه منه لكي يتخلص منه بطريقة ملائمة . وبموجب توجيه أمريكا الشمالية فإنه يجب التخلص من هذا الجهاز حسب القوانين المحلية المتعلقة بالتخلص من الأجهزة الكهربائية والمعدات الإلكترونية .



أي شخص مسئولاً عن حماية البيئة لتقليل أثار أخطار المواد المحتوية على شحنات كهربائية أو الكترونية على الانسان . فضلاً قم بعملك وذلك بالتأكد من أن الجهاز تم التخلص منه بطريقة ملائمة . الرمز الموجود بالأسفل يشير إلى عدم التخلص من الجهاز بهذه الطريقة .

### تقرير الشكاوى

عند استخدام هذا الجهاز فإنه يصدر إشعاعات تردد راديو وإذا لم يتم تثبيته واستخدامه حسب تعليمات الدليل ربما يحدث تدخل على تواصل اتصال جهاز الراديو . وقد تم تصميمه خلال حدود الدرجة أ من الأجهزة الكمبيوترية لتوفير الحماية ضد هذا التدخل عند تشغيله في بيئة تجارية .

وستجد بالدليل " كيفية معرفة وحل مشكلات تداخل الراديو " والذي تم إعداده من لجنة الاتصالات الفيدرالية .

### حقوق النسخ

جميع الحقوق محفوظة ويمنع إعادة الإنتاج أو الاستخدام بدون الموافقة الكتابية المسبقة للمحتوى المطبوع أو المصور . ولا يوجد مسؤولية للاختراع فيما يتعلق باستخدام المعلومات المتاحة .

### الإنكار

في حين أخذ جميع الاحتياطات في اعداد هذا الدليل فإن البائع ليس مسؤولاً عن أي أخطاء أو إغفال ولا أي مسؤولية متعلقة بالأضرار الناتجة عن استخدام المعلومات . وتم فحص جميع التعليمات والرسومات بدقة لسهولة الاستخدام ويعتمد صحة وأمان الاستخدام على دقة المستخدم . ولهذا فإن البائع لا يمكنه عمل ضمان لضمان أي إجراء ولا لأي ضرر للأشخاص المستخدمين للجهاز ويعتبر الأشخاص القائمين بالإجراءات هم المسؤولون عن تلك الأضرار .